


## BRUGSANVISNING - KANYLEBEHOLDERE

Undgå stikulykker. Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden brug af kanylebeholderen.

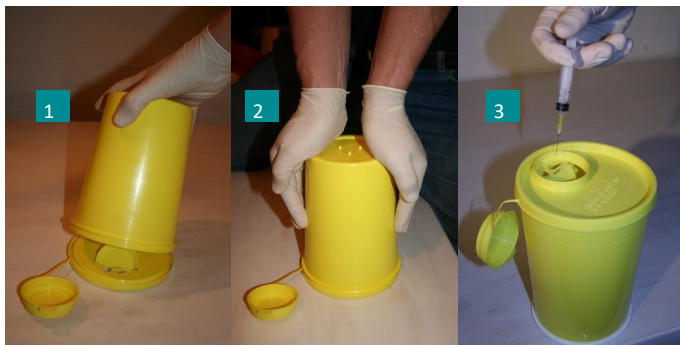

### INDEN BRUG

- 1 Anbring låget med toppen nedad på et fast underlag - f.eks. et bord. Placer spanden med bunden opad i låget
- 2 Pres med hele kroppens vægt spanden ned i låget, indtil der lyder et klik
- 3 Nu er beholderen klar til brug. Er kanylebeholderen fastspændt i den særlige borddisk, er det endnu lettere at foretage hele processen med én hånd.



### UNDER BRUG

- 4 Låget er designet til bortskaffelse af tre typer farligt affald: Kanyler, Insulinpenne, Skalpeller og andre skarpe genstande. Det er vigtigt at benytte det korrekte hul til de nævnte tre typer.

#### Bortskaffelse af redskaber:

**Kanyler:** Kanylehovedet fastholdes i aftrækkssporet. Træk sprøjten opad. Kanylen frigøres og flader ned i beholderen.

**Insulinpenne:** Indsæt nålehovedet ved hullets største åbning og skub pennen mod den smallere ende. Når nålehovedet er fastklemt, drejes insulinpennen, indtil skaftet er fri af nålehovedet. Et let skub med pennen presser nålen ned i beholderen.

**Skalpeller/skarpe genstande:** Dumpes i det store hul.

- 5 **Vendbart "flap-låg":**

Det lille vendbare låg med stroppen har to funktioner:  
A: Midlertidig lukning - B: Permanent lukning  
Er beholderen i brug, anvendes den midlertidige lukning ("A" på låget opad). Er beholderen fyldt, anvendes den permanente lukning ("B" på låget opad).

**OBS! Flyd aldrig over den markerede fyldelinje**

### EFTER BRUG

- 6 **Permanent lukning:** Det vendbare "flap-låg" (med "B" på låget opad) presses fast over åbningen. Herefter kan låget ikke åbnes igen. Beholderen er nu forseglet og klar til destruktion ifølge institutionens anvisninger.



**Bemærk:** Sikkerhedsbeholderen fås med rødt låg til opsamling af medicinrester og med blå låg til kviksvovsaffald. - Se mere på [www.uson.dk](http://www.uson.dk)



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485